



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĒNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu

Cena: 11,95 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 2,07 €



Apraksts

3iX Ērcu Noņemšanas Cilpa

3iX Ērcu Noņemšanas Cilpa (dažkārt dēvēta par "TickLasso") ir inovatīvs rīks, kas ļauj droši un efektīvi noņemt ērces, neveicinot slimību pārnēsi risku. Tās cilpas sistēma satver ērcīti, nespiežot to, nodrošinot, ka viss parazīts (tostarp galva) tiek izņemts ātri, tīri un ar minimālu diskomfortu gan ērces "nesējam", gan pašam lietotājam.

Galvenās īpašības

- **Droša & Pilnīga Izņemšana:** Izvairās no ērces saspiešanas vai kairināšanas, kas palīdz novērst patogēnu atgrūšanu brūcē.
- **Cilpas Sistēma:** Viegli satver ērcīti (mazu vai lielu), nodrošinot veselās ērces galvas izņemšanu.
- **Samazina Infekciju Risku:** Maigā izņemšanas metode ievērojami samazina tādu slimību kā Laimas boreliozes vai ērcu encefalīta pārnēsi.
- **Universāla Lietošana:** Piemērota cilvēkiem un dzīvniekiem (suņiem, kaķiem, lopiņiem) – noderīga āra mīļotājiem, ceļotājiem, medniekiem u.c.
- **Viegls & Kompakts:** Svars ir tikai 6 g, garums aptuveni 11.5 cm – ērti pārnēsāt kabatā vai pirmās palīdzības komplektā.
- **ISO 9002 Sertificēta:** Izstrādāta un ražota Zviedrijā, ievērojot stingrus kvalitātes standartus.



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas kods: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĒNS ADMAKSALI)


Specifikācijas

- **Garums:** 11.5 cm
- **Svars:** 6 g

Lietošana

1. Novietojiet cilpu ap ērces mutesdaļu - izvairieties no spiediena uz ērces ķermeni.
2. Maigi savelciet cilpu, lai satvertu ērces ķermeni, to nespiežot.
3. Viegls pagrieziens (ja nepieciešams) un pēc tam vienmērīgi izvelciet. Šī metode izmanto pašas ērces “adatu” priekšrocības.
4. Droši utilizējiet ērci (piem., noskalojiet to, ietiniet līmlentē vai pārbaudiet to uz slimībām). Ja ērce bijusi pieķērusies ilgāku laiku, ieteicams to nodot pārbaudei.
5. Notīriet un dezinficējiet gan koduma vietu, gan noņemšanas rīku.

Padoms: Jo ilgāk ērce ir piestiprināta, jo vairāk palielinās infekcijas risks. Vienmēr noņemiet ērci pēc iespējas ātrāk – vēlams 24 stundu laikā – un izvairieties no “mājas metožu” izmantošanas, kas ērci var kairināt.

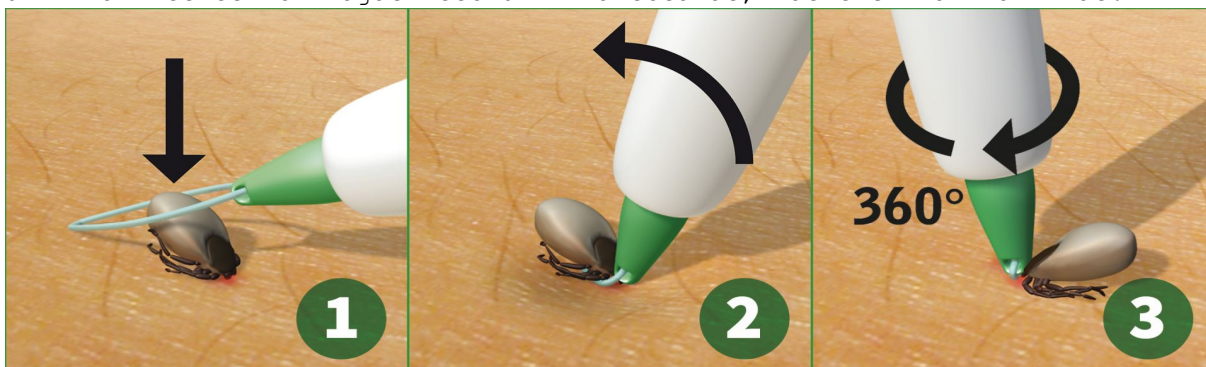

Papildu Informācija

- [Plašāka Informācija par Ērcu Izraisītām Slimībām & Profilaksi \(angļu valodā\)](#)

Ar **3iX Ērcu Noņemšanas Cilpu** dažāda izmēra ērces var noņemt saudzīgi un efektīvi, mazāk radot diskomfortu bērniem, mājdzīvniekiem vai jūtīgām ķermeņa vietām. Izstrādāta un ražota Zviedrijā, šī ierīce ir neatņemama ārstu, veterinārārstu un ikdienas dabas mīļotāju izvēle, lai ērces noņemtu ātri un droši.

Ražotājs:

Karo Pharma AB

Box 16184, 103 24 Stokholma, Zviedrija