



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга



Цена 27,95 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 4,85 €



Описание

Rhino Rescue Набор для Закрытия Ран

Мгновенное, безболезненное лечение порезов • Компактная аптечка

Закройте порез **мгновенно и без швов**, где бы вы ни находились. Набор Rhino Rescue содержит всё для дезинфекции, сближения краёв и перевязки небольших ран без игл, ниток или клея. Идеален для EDC-подсумков, авто, тира, путешествий и домашней безопасности.

Состав набора (21 × 24 × 2,5 см · 165 г)

- 6 × **регулируемых полоски-замыкателя** (две тяговые ушки стягивают края; при длинных порезах используйте несколько)
- 1 × салфетка с БЗК антисептиком
- 2 × спиртовые салфетки (70 % ИПС)
- 1 × стерильная марлевая салфетка + 1 × рулон биндажа
- 1 × водонепроницаемая прозрачная повязка
- 1 × пара нитриловых перчаток • 1 × травматические ножницы • 1 × рулон фиксатора
- Пошаговая **инструкция**

Преимущества полосок Rhino



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

- **Без швов** – края раны сходятся без иглы и анестезии.
- **Точная регулировка** – двойные ушки задают нужное давление.
- **Сильный клей** и **прочная флисовая основа** держатся во время заживления.
- **Быстрое применение** в походе, на тренировке, в мастерской.

Краткая инструкция

1. Наденьте перчатки. Обработайте рану спиртом и БЗК.
2. Уберите излишки крови стерильной марлей.
3. Наклейте полоску, плотно прижав к сухой коже.
4. Тяните ушки, пока края не сомкнутся; пригладьте для фиксации.
5. При необходимости закройте прозрачной повязкой или биндажем.

Важно: При глубоких, загрязнённых ранах или сильном кровотечении немедленно обратитесь к врачу.

Параметры упаковки

Размер	≈ 21 × 24 × 2,5 см
Масса	≈ 165 г
Срок годности	см. маркировку
Назначение	Первая помощь при неглубоких порезах

Безопасность и стандарты

Используйте только на чистых поверхностных ранах, не шире полоски. Проверяйте кожу на аллергию к клею. Одноразовый стерильный комплект. Храните в сухом прохладном месте.

Производитель / ответственный в ЕС

EMS RUN / Rhino Rescue
Fenbin Rd 100, 214000 Уси, Китай
emsrun.com/contact